

COGY ご利用の皆様
COGY と一緒だと出来ることもたくさん



マラソン大会に
出場し完走！！



みんなで
お花見へ



いつもお留守番だった
旅行にも



どこへでも自由に！
イベント参加も！



COGY にはサイズがあります
身長に合わせてお選び下さい。



SS(スモールサイズ)
背の小さい方向け
100 cm～140 cmぐらい

希望小売価格
398,000 円(非課税)



Mサイズ*
標準サイズ
140 cm～180 cmまで

希望小売価格
329,000 円(非課税)



Lサイズ*
背の大きい方向け
180 cm以上

希望小売価格
370,000 円(非課税)

・COGY は購入以外にレンタルもございます。
介護保険レンタル対応可
※介護認定を受けている方はご担当のケアマネージャー様へご相談ください。

お問合せ (特非) 希少難病ネットつながる
〒133-0056 東京都江戸川区南小岩 8-6-2 本間ビル 101
☎ 050-5873-4653 / ✉ katori@rdnet.jp
受付時間 9:00～18:00

●お問合せフォームはこちら →
資料請求 / その他問合せ



<https://rdnet.jp/act/cogy-global/>

日本発！世界初！
あきらめない人の車いす

COGY

あなたの乗る車いすが、
あなたの足を動かすきっかけになれないか。
そんな思いから、ペダル付き車いす
「コギー」は生まれました。



こんなお悩みはありませんか？

- 楽しく運動したい
- 綺麗に立ちたい・歩きたい
- 体力を取り戻して自信をつけたい
- 外出したいが膝や腰が痛くて…
- 病気や加齢により自立歩行が難しい

1つでも該当した方は COGY がぴったり！

もう一度動ける可能性を、あなたに。

歩行が難しい方でも、どちらかの足が少しでも動かせれば、自分の両足でペダルをこげる可能性があります。しかもスピードは、早足程度まで出すことができます。

小回りが利いて安全に スイスイ移動できるのが楽しい！！

安全性

杖をついて立った歩行移動などと比べて、転倒の危険や恐怖感も少なく、座った状態での自立運動も期待できる福祉機器です。



笑顔とともに

自分の意志と力で動くことは、失われた日常を取り戻し、人生は輝きを増します。移動の自由は理屈抜きで人を笑顔にします。



様々な症状・幅広い年齢の方にご利用いただいております。

お子様から年配の方まで幅広い年齢の方にご利用いただいております。症状や目的も様々

- ・高齢者の体力の維持や移動手段として
- ・足の衰えを防ぐため普段の移動手段に利用
- ・普段のリハビリに COGY を取り入れる方
- ・COGY に乗って通勤し、社会復帰できた方 など



なぜ、漕げるのか？

半田康延(東北大学大学院客員教授)

足が少しでも不自由な人にとって歩くということ非常に大変なことです。足こぎ車いすはそんな方々にとって大変便利な移動手段です。それは、足こぎ車いすが弱い筋力でも漕げるほど軽いということがまず第一に挙げられます、また、例えば脳卒中のように脳からの指令が一方の足に届きにくい、全く届かない場合でも、脊髄にある「原始的歩行中枢」が働きだして、動く方の足でペダルを動かすと反射的に動きにくい足に運動指令を出し、両足で交互にペダルを踏むことができるようになります。

この足こぎ車いすは、両足が完全に麻痺した方や関節が固まって動かなくなってしまった方を除き、脳卒中のみならず脊髄損傷、脳性麻痺その他大部分の歩行困難な方々に適用可能です。足こぎ車いすは自分自身の筋肉を使って漕ぐものであるためリハビリと健康の維持増進に非常に効果的ですし、そして何よりも、買い物や散策そして旅行と人生を大いにエンジョイでき、かつ職場復帰も可能とする夢の移動機器なのです。

日本だけでなく、欧米でも認可取得済み
アメリカ FDA (アメリカ食品医薬局) 認証、EU CE マーク取得、ベトナム社会主義共和国保健省医療認証
日本国内：福祉用具情報システム TAIS コード取得済み



反応する原始的歩行中枢(イメージ図)

多くの方に可能性

「足こぎ運動」は、生まれたての赤ちゃんも持っている人間に本来的に備わっている脊髄反射を応用することで、足が不自由な方でも無理なく足こぎできる可能性があります。



生まれて間もない赤ちゃんは脳からの指令で歩く機能が来ていません。しかし、抱き上げて前傾すると足をパタパタと動かし、歩くように反射的に足を動かします。

まずはムービーを
ごらんください…

リハビリにも
なるのかな？

片足が思うように
動かないんだけど？

詳しく知りたい方は
COGY サイトへ→



<https://cogycoy.com/>




COGY に乗ると足が動く仕組み 3STEP & COGY のこだわり

1. 軽いペダルにより
足が前に出る

COGY のこだわり①


軽い力で動くペダル

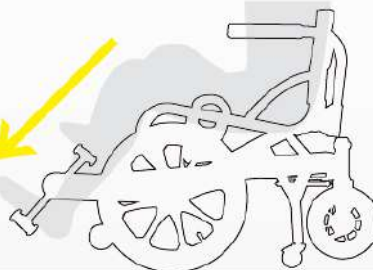

2. 原始的歩行中枢
が刺激される

COGY のこだわり②

「歩行中枢」を刺激しやすい姿勢を作る座面
座るとお尻が沈み少し前傾する姿勢になります。

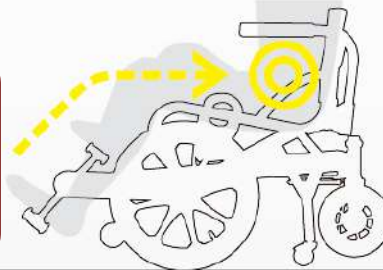

3. 歩行反射が引き起こされ
もう片方の足が前に出る

